

# PCC Well 125 x 200 cm



## Toevoeging op de handleiding PCC ledikant

De PCC Well is een brede versie van het standaard PCC ledikant. Deze handleiding moet in combinatie gezien worden met de standaard meegeleverde handleiding voor de PCC.

In de laagste stand is bovenkant inlegraam 285 mm van de grond. Het maximale verstelbereik is 500 mm. Het maximum persoonsgewicht van het ledikant is 185 kg (maximale totale belasting 220 kg).

Het is belangrijk dat gebruikers en verzorgers deze handleidingen lezen voordat het ledikant in gebruik genomen wordt.

Spring Producties B.V.  
Gaffel 19  
3891 KC Zeewolde - NL  
Telefoon: +31 (0)36 – 522 74 87  
Telefax : +31 (0)36 – 522 58 87  
E-mail: [info@spring-produkties.nl](mailto:info@spring-produkties.nl)  
Website : [www.spring-produkties.nl](http://www.spring-produkties.nl)



Versie 1 03 Oktober 2013

## A. Plaatsing

1. Het ledikant dient geplaatst te worden op een vlakke stabiele vloer. Zie instructies in de handleiding van de standaard PCC.
2. Bij gebruik van een bedgalg of portalen moeten deze vrij blijven van het plafond, contactdozen, plafondliften etc.
3. Het ledikant moet zo geplaatst worden dat tijdens het omhoog bewegen geen wandcontactdozen of andere obstakels in de weg zitten.
4. Als het ledikant op de juiste plaats staat moet het bed d.m.v. de rempedalen van de wielen op de rem gezet worden.
6. Het ledikant mag slechts uitgerust worden met erkende accessoires. Er mogen geen hekken en bedgalgen etc. gebruikt/gemonteerd worden die niet door Spring Producties B.V. geleverd zijn!

## B. Ingebruikname

1. Voordat het matras geplaatst wordt moeten alle functies getest worden.

**Met onderstaande matrasbepalingen vervallen de matrasbepalingen in de handleiding van het standaard PCC Ledikant.**

2. De matrasdikte moet in verhouding met de zijhekken zijn. **De totale matrasdikte mag maximaal 21 cm zijn!** Er moet altijd **22 cm** tussen bovenkant matras en bovenkant zijhekken zijn!

**125 x 200 cm: Het matras moet minimaal 124 cm breed en 198 cm lang zijn!**

Bij gebruik van een verlengstuk 10 cm:

**125 x 210 cm: Het matras moet minimaal 124 cm breed en 208 cm lang zijn!**

Tevens dienen in dit geval ook de langere hekken gemonteerd worden.

## C. Bediening door gebruiker/verzorger

1. Uit veiligheidsoverweging wordt geadviseerd het ledikant (als er geen verzorging of andere reden voor een hoge stand is) in de lage stand te gebruiken.
2. **De zijhekken moeten altijd in de hoge stand gebruikt worden, als er geen reden is voor de lage stand.**
3. **Voorkom dat personen of dieren onder het ledikant kruipen in verband met afknelpgevaar van de bewegende delen. Steek tijdens verstellen van het ledikant of hekken geen lichaamsdelen of voorwerpen tussen scharnieren, draaipunten of andere plaatsen waar zij bekneld kunnen worden. Voorkom dat kabels afgeknelde kunnen worden.**
4. Let op dat er geen stoelen / tafels onder het ledikant staan in de hoge stand. Bij het naar beneden bewegen van het ledikant worden deze afgeklemd. Deze meubels kunnen beschadigen, maar wat erger is het ledikant kan gaan kantelen. Zet het ledikant ook niet onder een vensterbank e.d.

5. Niet tegen of op zijhekken gaan hangen. Hekken ook niet gebruiken als optrek- en transferhulp.
6. Geen gloeiende of brandende voorwerpen op het ledikant zetten.
7. Ledikant niet verplaatsen in de hoogste stand in verband met de stabiliteit.
8. De gebruiker bedient het ledikant met de volgende handbediening:



Met deze handbediening worden alle functies bediend van het ligvlak en van de H/L verstelling. Met het sleuteltje kunnen alle functies geblokkeerd worden.

**Let op:** Niet met de schakelaar spelen. Veelvuldig/snel achter elkaar knoppen blijven indrukken en meerdere knoppen tegelijk indrukken kan de besturing onherstelbaar beschadigen.

Inschakelduur 10% (6 minuten per uur) met een maximum van 2 minuten per schakeling. Voorbeeld: 2 minuten bewegen en 20 minuten niet bewegen.

## D. Reiniging en onderhoud

1. Het ledikant kan gereinigd worden met normale huishoud reinigingsmiddelen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Het gebruik van een hogedrukreiniger of stoomcleaner is niet toegestaan. Verder is het ledikant onderhoudsvrij.

3. Voor storingen bel leverancier.

## E. Aluminium zijhekken

Voor bediening, veiligheid etc., zie meegeleverde handleiding standaard PCC Ledikant.