

# PCC Low

(met Limoss besturing vanaf sept. 2014 en vanaf serienummer:  
551487 )



## Toevoeging op de handleiding PCC ledikant

De PCC Low is een ledikant die in de basis hetzelfde is als het standaard PCC ledikant. Deze handleiding moet in combinatie gezien worden met de standaard meegeleverde handleiding voor de PCC.

Het is belangrijk dat gebruikers en verzorgers deze handleidingen lezen voordat het ledikant in gebruik genomen wordt.

Spring Producties B.V.  
Gaffel 19  
3891 KC Zeewolde - NL  
Telefoon: +31 (0)36 – 522 74 87  
Telefax : +31 (0)36 – 522 58 87  
E-mail: [info@spring-producties.nl](mailto:info@spring-producties.nl)  
Website : [www.spring-producties.nl](http://www.spring-producties.nl)



Versie 2 10 sept 2014

## A. Plaatsing

1. Het ledikant dient geplaatst te worden op een vlakke stabiele vloer. Zie instructies in de handleiding van de standaard PCC.
2. Bij gebruik van een bedgalg of portalen moeten deze vrij blijven van het plafond, contactdozen, plafondliften etc.
3. Het ledikant moet zo geplaatst worden dat tijdens het omhoog bewegen geen wandcontactdozen of andere obstakels in de weg zitten.
4. Als het ledikant op de juiste plaats staat moet het bed d.m.v. de rode rempedalen van de wielen op de rem gezet worden.
6. Het ledikant mag slechts uitgerust worden met erkende accessoires. Er mogen geen hekken en bedgalgen gebruikt/gemonteerd worden die niet door Spring Producties B.V. geleverd zijn!


## B. Ingebruikname

1. Voordat het matras geplaatst wordt moeten alle functies getest worden.
2. De matrasdikte moet in verhouding met de zijhekken zijn. **De matrasdikte mag variëren tussen de 12 en 22 cm!** Er moet altijd **22 cm** tussen bovenkant matras en bovenkant zijhekken zijn!  
**Het matras moet minimaal 89 cm breed en 198 cm lang zijn! Zie hoofdstuk G in standaard handleiding.**

## C. Bediening door gebruiker/verzorger

1. Uit veiligheidsoverweging wordt geadviseerd het ledikant (als er geen verzorging of andere reden voor een hoge stand is) in de lage stand te gebruiken.
2. **De zijhekken moeten altijd in de hoge stand gebruikt te worden, als er geen reden is voor de lage stand.**
3. **Voorkom dat personen of dieren onder het ledikant kruipen in verband met afknelgevaar van de bewegende delen. Steek tijdens verstellen van het ledikant of hekken geen lichaamsdelen of voorwerpen tussen scharnieren, draaipunten of andere plaatsen waar zij bekneld kunnen worden.**
4. Let op dat er geen stoelen / tafels onder het ledikant staan in de hoge stand. Bij het naar beneden bewegen van het ledikant worden deze afgeklemd. Deze meubels kunnen beschadigen, maar wat erger is het ledikant kan gaan kantelen. Zet het ledikant ook niet onder een vensterbank e.d.
5. Niet tegen of op zijhekken gaan hangen. Hekken ook niet gebruiken als optrek- en transferhulp.
6. Geen gloeiende of brandende voorwerpen op het ledikant zetten.
7. **Ledikant niet verplaatsen in de laagste stand in verband met de geringe grondspeling van de besturing (ca. 10 cm omhoog verstellen). Ook niet verplaatsen in de hoogste stand in verband met de stabiliteit.**

8. De **gebruiker** bedient het ledikant met de volgende handbediening:

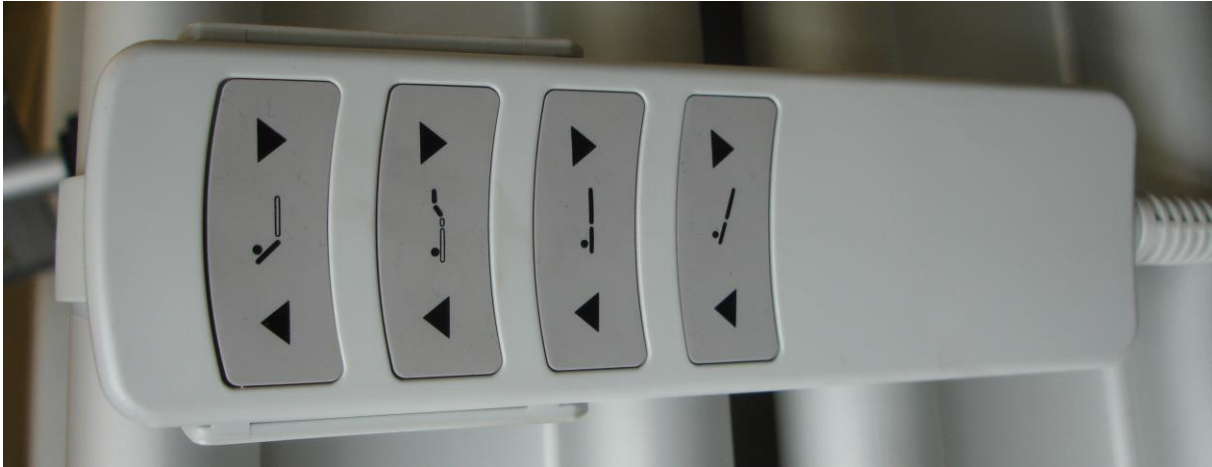

Met deze handbediening worden alle functies bediend van het ligvlak en de **onderste trap** van de H/L verstelling (1<sup>e</sup> 400 mm). Zie afbeelding op pagina 4. Met het sleuteltje kunnen alle functies geblokkeerd worden. Zie voor alle functies van de schakelaar en de blokkeersleutel op de achterkant van de schakelaar: pagina 16 + 17 van handleiding van de standaard PCC.

9. De **verpleging** bedient het ledikant met de volgende handbediening:



Met deze handbediening wordt de **bovenste trap** van de H/L verstelling (2<sup>e</sup> 400 mm) bediend. Zie afbeelding op pagina 4. Met het sleuteltje kunnen alle functies geblokkeerd worden.

**Let op: de handbediening van de verpleging buiten het bereik van de gebruiker ophangen in verband met de veiligheid (b.v. aan het voeteneinde).**



Onderste trap van de H/L verstelling (1<sup>e</sup> 400 mm).



Bovenste trap van de H/L verstelling (2<sup>e</sup> 400 mm)

## D. Reiniging en onderhoud

1. Het ledikant kan gereinigd worden met normale huishoud reinigingsmiddelen. Het gebruik van een hogedrukreiniger of stoomcleaner is niet toegestaan. Verder is het ledikant onderhoudsvrij.


3. Voor storingen bel leverancier.

## E. Plaatsing aluminium zijhek en bediening plus veiligheid.

Zie bladzijde 9 en verder en de gebruiksinstructie die begint op pagina 15 in de standaard handleiding PCC ledikant.

## F. Kleurcodering besturing en kabels.

De besturing van de **gebruiker** zit in het midden onder het ligvlak. Zie onderstaande kleurcodering:

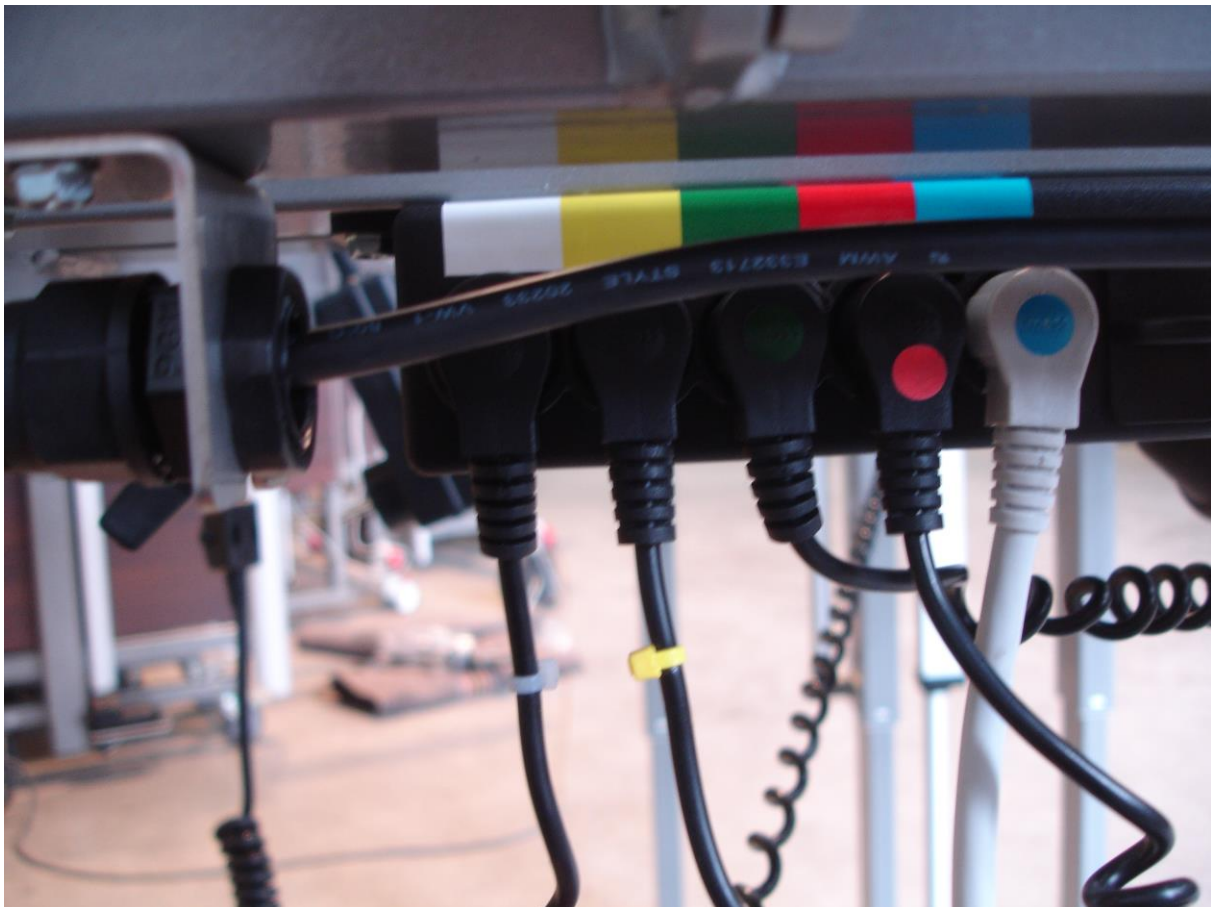

De besturing van de **verpleging** zit in het midden onder het ligvlak. Zie onderstaande kleurcodering:

