

PCC Lowsleeper



Toevoeging op de handleiding PCC ledikant

De PCC Lowsleeper is een ledikant die in de basis hetzelfde is als het standaard PCC ledikant. Deze handleiding moet in combinatie gezien worden met de standaard meegeleverde handleiding voor de PCC.

In de laagste stand rust het ligvlak op de grond. Het maximale verstelbereik is 800 mm.

Het is belangrijk dat gebruikers en verzorgers deze handleidingen lezen voordat het ledikant in gebruik genomen wordt.

Spring Producties B.V.
Gaffel 19
3891 KC Zeewolde - NL
Telefoon: +31 (0)36 – 522 74 87
Telefax : +31 (0)36 – 522 58 87
E-mail: info@spring-producties.nl
Website : www.spring-producties.nl



Versie 3 15 Juli 2015

A. Plaatsing

1. Het ledikant dient geplaatst te worden op een vlakke stabiele vloer. Zie instructies in de handleiding van de standaard PCC.
2. Bij gebruik van een bedgalg of portalen moeten deze vrij blijven van het plafond, contactdozen, plafondliften etc.
3. Het ledikant moet zo geplaatst worden dat tijdens het omhoog bewegen geen wandcontactdozen of andere obstakels in de weg zitten.
4. Als het ledikant op de juiste plaats staat moet het bed d.m.v. de rode rempedalen van de wielen op de rem gezet worden.
6. Het ledikant mag slechts uitgerust worden met erkende accessoires. Er mogen geen hekken en bedgalgen gebruikt/gemonteerd worden die niet door Spring Producties B.V. geleverd zijn!

B. Ingebruikname

1. Voordat het matras geplaatst wordt moeten alle functies getest worden.
2. De matrasdikte moet in verhouding met de zijhekken zijn. **De matrasdikte mag maximaal 27 cm zijn!** Er moet altijd **22 cm** tussen bovenkant matras en bovenkant zijhekken zijn! **Het matras moet minimaal 89 cm breed en 198 cm lang zijn! Zie hoofdstuk G in standaard handleiding.**

C. Bediening door gebruiker/verzorger

1. Uit veiligheidsoverweging moet het ledikant (als er geen verzorging of andere reden voor een hoge stand is) in de lage stand gebruikt worden.
2. **De zijhekken moeten altijd in de hoge stand gebruikt te worden, als er geen reden is voor de lage stand.**
3. **Voorkom dat personen of dieren onder het ledikant kruipen in verband met afknelgevaar van de bewegende delen. Steek tijdens verstellen van het ledikant of hekken geen lichaamsdelen of voorwerpen tussen scharnieren, draaipunten of andere plaatsen waar zij bekneld kunnen worden. Voorkom dat kabels afgekneld kunnen worden.**
4. Let op dat er geen stoelen / tafels onder het ledikant staan in de hoge stand. Bij het naar beneden bewegen van het ledikant worden deze afgeklemd. Deze meubels kunnen beschadigen, maar wat erger is het ledikant kan gaan kantelen. Zet het ledikant ook niet onder een vensterbank e.d.
5. Niet tegen of op zijhekken gaan hangen. Hekken ook niet gebruiken als optrek- en transferhulp.
6. Geen gloeiende of brandende voorwerpen op het ledikant zetten.
7. **Ledikant niet verplaatsen in de laagste stand in verband met de geringe grondspeling (ca. 10 cm omhoog verstellen). Ook niet verplaatsen in de hoogste stand in verband met de stabiliteit.**

8. De **gebruiker** bedient het ledikant met de volgende handbediening:



Met deze handbediening worden alle functies bediend van het ligvlak en de **onderste trap** van de H/L verstelling (1^e 400 mm). Zie afbeelding op pagina 5.



Met het slotje op de handbediening kunnen alle functies geblokkeerd worden. (slotje open – slotje dicht). Het ledikant kan wel anti trendelenburg versteld worden (voeten naar beneden) Door het slotje op de romeinse I of II te zetten kan de trendelen burg verstelling gebruikt worden (hoofd naar beneden).

Standaard wordt deze geblokkeerd afgeleverd.

Let op: trendelen burgverstelling is een medische handeling die niet door onbevoegden mag gebruikt worden.

Dit gedeelte van de besturing is voorzien van een **noodbatterij**. Als de netspanning wegvalt, kan de rug en/of de beenverstelling van het ligvlak in de onderste stand gezet worden (horizontaal).

Het is niet bedoeld om andere functies van het ledikant te gebruiken op deze noodbatterij.

Let op: bedien nooit het ledikant als het netsnoer niet in de wandcontactdoos zit. De noodbatterij loopt dan onbedoeld leeg!

9. De **verpleging** bedient het ledikant met de volgende handbediening:



Met deze handbediening wordt de **bovenste trap** van de H/L verstelling (2^e 400 mm) bediend. Zie afbeelding op pagina 5. Met het sleuteltje kunnen alle functies geblokkeerd worden.



Let op: de handbediening van de verpleging buiten het bereik van de gebruiker ophangen in verband met de veiligheid (b.v. aan het voeteneinde).

Omdat dit ledikant in de laagste stand op de grond komt, zijn de zijliggers van het ligvlak beveiligd met een schakelsysteem, wat afknelling voorkomt als er iets onder komt.



Onderste trap van de H/L verstelling (1^e 400 mm).



Bovenste trap van de H/L verstelling (2^e 400 mm)

D. Reiniging en onderhoud

1. Het ledikant kan gereinigd worden met normale huishoud reinigingsmiddelen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Het gebruik van een hogedrukreiniger of stoomcleaner is niet toegestaan. Verder is het ledikant onderhoudsvrij.

3. Voor storingen bel leverancier.

E. Aluminium rolhek, bediening en veiligheid.

Dit ledikant is uitgerust met een aluminium rolhek.

De hekken moeten na plaatsing van het bed gecontroleerd en geïnstrueerd zijn aan verzorgers en gebruikers. De hekken moeten altijd in de hoogste stand staan behalve bij verzorging. Laat nooit het hek in de laagste stand staan als er geen toezicht is. Ook niet voor een paar seconden, *DIT IS ERG GEVAARLIJK!!*

De hekken kunnen zonder bediening omhooggetrokken worden. Zorg dat beide kanten van het hek goed in de vergrendeling geklikt is.

De hekken laten zakken gaat als volgt: het hek vastpakken, iets omhoogtrekken, ontgrendelknop bedienen en het hek geleiden tijdens het zakken. Het hek zakt dan schuin weg. Handel aan de andere kant op de zelfde wijze. Het hek rolt dan uit zich zelf netjes op.

Als het hek in de bovenste stand staat kan de ontgrendelknop, (door de veerspanning van de rol), zonder optillen van de bovenligger niet bediend worden.



Ontgrendelknop.